


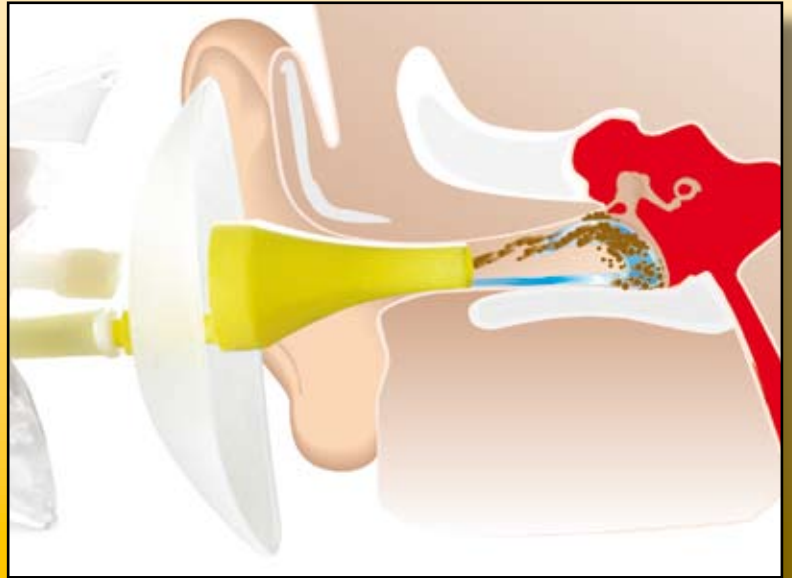

# Auricolav<sup>®</sup>

Dispositivo medico monouso sterile per il lavaggio del condotto uditivo esterno con soluzione fisiologica sterile.



**Riscaldare la soluzione a 37°C** circa immergendo la sacca in acqua calda nel lavello del bagno e verificare la temperatura inserendo l'apice del termometro nella piega della sacca ottenuta ripiegando quest'ultima su se stessa (vedi istruzioni allegate alla confezione).

## Quando e perché usare Auricolav:

- 1) Previene la formazione e favorisce la rimozione del cerume, utile anche nei portatori di apparecchi acustici in quanto la rimozione del cerume ne favorisce il funzionamento;
- 2) Favorisce l'eliminazione delle squame che derivano dal processo di desquamazione epiteliale nella prevenzione del tappo epidermico e nell'eczema del condotto uditivo esterno (CUE);
- 3) Favorisce l'eliminazione del materiale micotico nelle micosi del CUE;
- 4) Favorisce la prevenzione delle otiti del CUE dopo bagni in piscina o in mare;
- 5) Favorisce la prevenzione della foruncolosi del CUE;
- 6) Favorisce la rimozione delle secrezioni patologiche nell'otite acuta del CUE.

## Caratteristiche del dispositivo:

- 1) **Sterilità** del dispositivo e della soluzione fisiologica.
- 2) **Temperatura:** per evitare vertigine riscaldare la soluzione contenuta nella sacca a 37°C circa .
- 3) **Efficacia:** la quantità di soluzione fisiologica che viene introdotta nell'orecchio permette di rimuovere più facilmente il cerume.
- 4) **Il dispositivo**, brevettato, è fornito di un sistema di scarico che evita il rischio di aumento della pressione sulla membrana timpanica.
- 5) **Adattabilità anatomica:** una confezione contiene 4 dispositivi: la parte che viene inserita nel condotto uditivo esterno durante il trattamento, speculo auricolare, ha diametri diversi in rapporto alle dimensioni del condotto uditivo esterno, in modo da poter scegliere quello che si adatta meglio alle dimensioni del condotto uditivo esterno.

## Confezione:

- n° 4 dispositivi con misure diverse
- n° 2 sacche da 250 ml di soluzione fisiologica

**Purling S.r.l.**

48022 Lugo (RA) Italy  
Tel. +39 0545 34734

www.purling.tv - e-mail: info@purling.tv

