



Aelav®

Dispositivo monouso sterile per il lavaggio o l'irrigazione della cavità vaginale con soluzione fisiologica sterile

Aelav favorisce il lavaggio della cavità vaginale

Riscaldare la soluzione

a 35°C+40°C circa immergendo la sacca in acqua calda nel lavello del bagno e verificare la temperatura con un termometro a raggi infrarossi oppure inserendo l'apice di un normale termometro nella piega della sacca ottenuta comprimendo manualmente quest'ultima su se stessa (vedi istruzioni allegate alla confezione).

Quando e perché usare Aelav:

- per favorire la **rimozione di secrezioni vaginali patologiche**;
- per facilitare la **rimozione di secrezioni patologiche dal fornice vaginale**;
- aiuta a curare le **vulvo-vaginiti infantili**;
- aiuta a trattare le **uretriti**;
- per il lavaggio della cavità vaginale in **condizioni di immobilizzazione a letto**;
- per il lavaggio della cavità vaginale **prima di interventi chirurgici**.

Caratteristiche del dispositivo

- L'ugello, a forma di oliva, di dimensioni molto ridotte, è fornito, sia nella sua parte superiore che nella parte inferiore, di fori disposti a raggera attorno all'asse centrale in modo da determinare dei getti, in alto, verso il fornice vaginale e dei getti, in basso, in modo da facilitare l'eliminazione all'esterno dei prodotti del lavaggio.
- La lunghezza e la morbidezza del tubo consentono di eseguire tutta l'operazione di lavaggio seduti sul bidet.



Confezione

n° 4 dispositivi sterili per il lavaggio vaginale e n° 4 sacche da 250 ml di soluzione fisiologica sterile.



Purling S.r.l.

P.le Carducci 20
48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 34734
Fax +39 0545 210539
www.purling.tv
e-mail: info@lavonase.com

È un dispositivo medico marcato CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione alla pubblicità depositata il 23/05/2006. Autorizzazione del 23/06/2006.