




Auricolav[®]



Dispositivo per il lavaggio del condotto uditivo esterno e della membrana timpanica

siringa

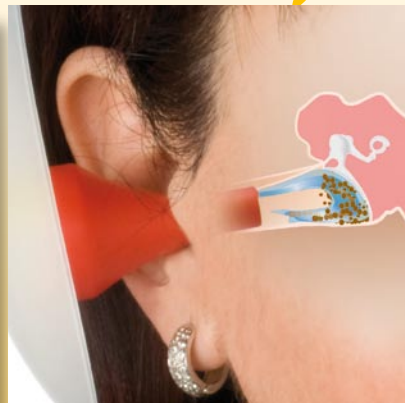

Riscaldare la soluzione a 37°C circa
e verificare la temperatura con un termometro.

Quando e perché usare Auricolav siringa:

- previene la formazione e favorisce la rimozione del cerume, utile anche nei portatori di apparecchi acustici in quanto la rimozione del cerume ne favorisce il funzionamento;
- favorisce l'eliminazione delle squame che derivano dal processo di desquamazione epiteliale nella prevenzione del tappo epidermico e nell'eczema del condotto uditivo esterno (CUE);
- favorisce l'eliminazione del materiale micotico nelle micosi del CUE;
- favorisce la prevenzione delle otiti del CUE dopo bagni in piscina o in mare;
- favorisce la prevenzione della foruncolosi del CUE;
- favorisce la rimozione delle secrezioni patologiche nell'otite acuta del CUE.



Caratteristiche del dispositivo:

Temperatura: per evitare vertigine riscaldare la soluzione a 37°C circa.

Efficacia: la quantità di soluzione che viene introdotta nell'orecchio permette di rimuovere più facilmente il cerume.

Il dispositivo, **brevettato**, è fornito di un **sistema di scarico** che evita il rischio di aumento della pressione sulla membrana timpanica.

Adattabilità anatomica: una confezione contiene 4 dispositivi: la parte che viene inserita nel condotto uditivo esterno durante il trattamento, speculo auricolare, ha diametri diversi in rapporto alle dimensioni del condotto uditivo esterno, in modo da poter scegliere quello che si adatta meglio alle dimensioni del condotto uditivo esterno.



Purling srl.
P.le Carducci 20
48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 34734
Fax +39 0545 210539
www.purling.tv
info@purling.tv



Confezione:

4 dispositivi, 1 siringa, 1 coppa protettiva



A921711192

