


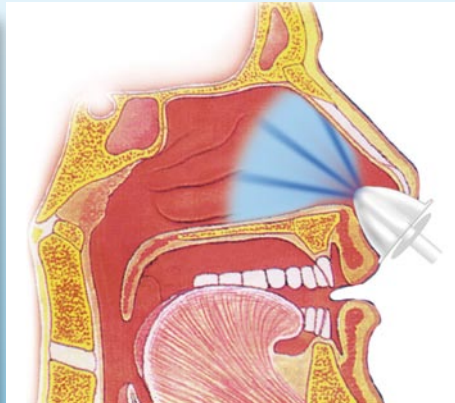

Lavonase®

Dispositivo monouso sterile per il lavaggio delle cavità nasali e della rinofaringe con soluzione fisiologica sterile



Riscaldare la soluzione a 35°C÷40°C circa immergendo la sacca in acqua calda nel lavello del bagno e verificare la temperatura con un termometro a raggi infrarossi oppure inserendo l'apice di un normale termometro nella piega della sacca ottenuta comprimendo manualmente quest'ultima su se stessa.

Quando e perché usare Lavonase:

- 1) Aiuta a curare e prevenire il **raffreddore** e la **sinusite** rimuovendo il catarro
- 2) Aiuta a curare le **allergie** delle vie respiratorie (riniti e rinosinusiti) rimuovendo il polline e le altre sostanze causa di allergie respiratorie e le polveri da smog
- 3) Aiuta a curare le laringiti, tracheiti, bronchiti, asma, (**sindrome rino-bronchiale**) rimuovendo il catarro dalle cavità nasali e dal rinofaringe
- 4) Aiuta a curare le **cefalee rinogene**
- 5) Aiuta a trattare il **russamento** migliorando la respirazione nasale
- 6) Nei **fumatori** in quanto migliora la clearance muco-ciliare
- 7) In coloro che vivono o lavorano in ambienti dove sono presenti **polveri, esalazioni chimiche o smog**
- 8) Per migliorare la **funzione olfattoria** in presenza di flogosi catarrale
- 9) Aiuta a curare ed a prevenire le **tubariti** e le **otiti medie**, in particolare nei bambini, rimuovendo il catarro dal rinofaringe
- 10) E' utile prima e dopo **interventi chirurgici** al naso e/o ai seni paranasali per rimuovere le secrezioni o le croste eventualmente presenti nelle cavità nasali
- 11) Quindi in tutti coloro che soffrono delle **patologie delle cavità nasali** con ristagno di secrezioni catarrali e/o croste che contribuiscono, insieme all'edema della mucosa, ad ostruire le cavità nasali, con conseguente difficoltà respiratoria nasale



n° 6 dispositivi per irrigazione nasale e 6 sacche da 250 ml di soluzione fisiologica sterile



n° 12 dispositivi per irrigazione nasale e 12 sacche da 250 ml di soluzione fisiologica sterile



n° 5 dispositivi per irrigazione nasale e n° 5 sacche da 500 ml di soluzione fisiologica sterile

Confezioni



Purling S.r.l.

P.le Carducci 20
48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 34734
Fax +39 0545 210539
www.purling.tv

e-mail: info@lavonase.com