



Niolav®

Dispositivo monouso sterile per il lavaggio o l'irrigazione rettale con soluzione fisiologica sterile

Niolav favorisce la naturale evacuazione e lo svuotamento dell'ampolla rettale

Riscaldare la soluzione a 35°C+40°C circa

immerso nella sacca in acqua calda nel lavello del bagno e verificare la temperatura con un termometro a raggi infrarossi oppure inserendo l'apice di un normale termometro nella piega della sacca ottenuta comprimendo manualmente quest'ultima su se stessa (vedi istruzioni allegate alla confezione).

Quando e perché usare Niolav:

- favorisce l'evacuazione nel caso di **stitichezza occasionale e cronica**;
- aiuta a ridurre il **gonfiore addominale** (meteorismo);
- favorisce l'evacuazione nel caso di **prolasso intestinale**;
- favorisce l'evacuazione nel caso di **lesioni midollari**;
- favorisce l'evacuazione e lo svuotamento dell'ampolla rettale nel caso di **feccoloma**;
- favorisce la naturale evacuazione in condizioni di **immobilizzazione a letto** in cui è necessario svuotare periodicamente l'ampolla rettale.

Caratteristiche del dispositivo

- L'ugello terminale, la cui particolare conformazione permette di adattarsi allo sfintere anale, aiuta ad impedire che la soluzione fuoriesca all'esterno durante tutta l'operazione di lavaggio.
- L'ugello è provvisto di 3 aperture di cui 1 nella parte superiore e 2 laterali.
- La lunghezza del tubo permette di eseguire tutta l'operazione di lavaggio seduti sul Water-closet oppure distesi sul letto.



Confezione

n° 4 dispositivi sterili per irrigazione rettale e n° 4 sacche da 250 ml. di soluzione fisiologica sterile.



Purling S.r.l.

P.le Carducci 20
48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 34734
Fax +39 0545 210539
www.purling.tv
e-mail: info@lavonase.com